


Sykepleie informasjon for Tru-Close® Thoracic Vent

NB! Skal følge pasienten.

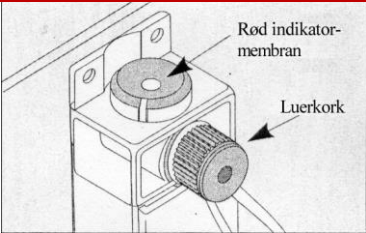

Tru-Close® er konstruert for behandling av spontan, traumatisk eller iatrogen pneumothorax

| | |
|----|--|
| 1 | Fikseringstapen skal være i direkte kontakt med huden. Kateterdelen skal ikke være synlig. En lufttett forsegling må opprettholdes for å forhindre subkutant emfysem. |
| 2 | Ikke fjern eller manipuler Tru-Close® under noen omstendigheter. |
| 3 |  <p>Når den røde membranen er oppblåst, vil trykket i pleurahulen være positivt (> 2mm Hg). Den røde membranen vil "suges ned" når trykket er negativt (< 2mm Hg). Det normale intrapleura trykket er konstant negativt. Derfor, hvis membranen ikke lenger rører på seg, kan det bety at pneumothorax er behandlet. Kontakt legen! (NB! Denne røde indikatoren fungerer ikke når pas. ligger på aktivt sug. Den er da delvis opphevet.)</p> |
| 4 | Man skal ved bruk av stetoskop kunne høre normale respirasjonslyder på den affiserte siden etter hvert som lungene re-ekspanderer. Dersom normale respirasjonslyder ikke høres i det hele tatt, kan dette indikere en feil om at lungene ikke re-ekspanderer slik den skal. |
| 5 | Unngå direkte kontakt med vann under dusjing og bading. |
| 6 | I bunnen av Tru-Close® er det en åpning for å drenere ut evt. væske/blod – selvklebende drenasjeåpning. Kontakt legen dersom det samles blod eller annen væske i plastkammeret. Tru-Close® er ikke konstruert for behandling av hemothorax! |
| 7 | Dersom pasienten får rød og irritert hud rundt Tru-Close®, bør lege kontaktes! |
| 8 | Luerkorken skal være skrudd på når porten ikke er i bruk (ved passiv drenasje). |
| 9 | Dersom pas. ligger på aktivt sug, må <u>ikke</u> sugestyrken overgå -20cm vannsøyle (14,7mmHg vakum). NB! Sugesslangen må <u>ikke</u> kobles direkte til veggssug. Bruk klemmen på sugesslangen når pas. kobles fra eksternt sug. |
| 10 | Dersom man ønsker å tape ventilen ytterligere til pasientens kropp, må man ikke tape øverst og nederst på kammeret fordi det er her luften passerer ut av pasienten. Man kan tape ekstra over klebepatchens "vinger". |

For ytterligere informasjon kontakt:

MEDA

Meda AS-Pb 194-1371 Asker- tlf 66 75 33 00 fax 66 75 33 33 –www.meda.no-info@meda.no